

BRUGSVEJLEDNING

OPTIM BLUE Servietter



1
Træk servietten skråt ud af bøtten som vist.



2
Tør overfladerne med servietten.
Servietten rengør og desinficere overfladen i samme arbejdsproces. Fjerner f.eks. også størknet blod.

Er overfladen snavset, brug da den ene side af servietten til at rengøre, og den anden til at desinficere. Er overfladen meget snavset anbefales at benytte flere servietter.



3
Efter brug kan både servietterne og den tomme bøtte destrueres som normalt affald. Kræver ingen særlig affaldsspand.

Vigtigt! Kontakttiden:

Efter desinficering skal overfladen forblive våd i minimum 1 minut. Herved er bakterier og virus bekæmpet. For bekæmpelse af mykobakterier og svampe er kontakttiden længere (se produktets etiket).

Gode råd:



Brug ikke mere væske end det som svarer til kontakttiden.

Du bør altid bruge handsker når du arbejder med væsker.

Brug gerne almindelige husholdningshandsker eller vinylhandsker, da visse Latex- og Nitrile handsker kan afgive en kedelig lugt, når det kommer i forbindelse med OPTIM BLUE.

Undgå at bruge OPTIM BLUE på kobber, messing, kulstof, blød plast og anodiserede aluminium.

Mindst 1 gang om ugen bør overfladerne afvaskes med vand for at fjerne rester af den eventuelle sæbefilm som OPTIM BLUE kan have afsat på overfladen.

Bland ikke OPTIM BLUE med andre kemikalier.