

Dansk label: OPTIM 33TB Vådservietter (EU)
Overfladerens og desinfektionsmiddel TIL MEDICINSK UDSTYR
DESINFEKTIONSMIDDEL TIL MEDICINSK UDSTYR
Aktivt stof: 0,5 % hydrogenperoxid
Effektivt spektrum og kontakttid: Bakteriedræbende - 1 min., Virusdræbende - 1 min., Tuberculocidal og Mykobakteriedræbende - 5 min. (M. terrae - 5 min., M. avium - 1 min.), svampedræbende* - 15 min.
*testet med Candida albicans
Testet i overensstemmelse med: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476
Brugsanvisning: Træk en serviet op af beholderen, og rens overfladen. Sørg for at overfladen forbliver våd i kontakt tiden. Efter kontakt tiden kan overfladen evt. aftørres.
Forsigtig: Anbefales ikke til brug på overflader, der består af messing eller kobber. Bør ikke anvendes til instrumenter i anodiseret aluminium eller med kulstofbelægning.
Undgå kontakt med øjnene. Kommer væsken i øjnene skyl derefter straks øjnene med vand. Ved indtagelse, skyl munden med vand, og søg læge.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Opbevares ved stuetemperatur (15-30 °C).
Produceret i Canada
Netto indhold: 160 servietter
<i>Accelerated Hydrogen Peroxide Technology and Design are trademarks of Virox Technologies Inc. used under license. OPTIM is a registered trademark of SciCan Ltd.</i>



SciCan
Your Infection Control Specialist™
www.scican.com

DK-distributør:
CleanClinic
Strandvejen 6
DK-4040 Jyllinge
www.cleanclinic.dk
+45 40103900